

O MANUAL DE INSTRUÇÕES

H₂ Flex M-300



"A TECNOLOGIA PROLONGANDO A NOSSA VIDA"

DADOS DO PRODUTO

GERADOR DE HIDROGÊNIO E OXIGÊNIO

Bem-vindo ao universo do Meu H2, este manual foi desenvolvido para orientá-los no uso correto e eficaz do equipamento.

Agradecemos por adquirir a nossa máquina de água hidrogenada.


Antes de usar, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o apropriadamente.

INSPEÇÃO DE DESEMBALAGEM

Depois que o usuário desembalar o produto, por favor, cuidadosamente leia o manual de instruções e inspecione a aparência do produto para garantir que esteja intacto.

ÍTEMES INCLUSOS NO KIT

- 1 Gerador Modelo H2 Flex M-300
- 1 Cabo de alimentação de energia 110v/220v
- 1 Cabo de alimentação de energia 12v
- 1 Conector cânula Y para inalação
- 1 Óculos
- 1 Fone
- 1 Cateter tipo óculos
- 1 Mangueira água com difusor de pedra
- 1 Funil

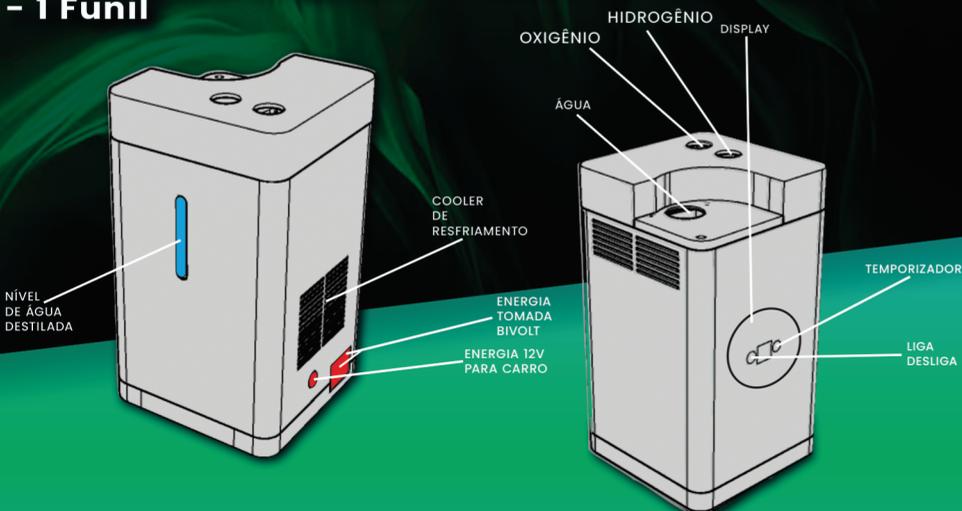

ETAPA DE OPERAÇÃO DO APARELHO

SIGA OS PASSOS DE 1 À 6.

PASSO 1:

Pressione o botão liga/desliga para ligar a máquina.

ETAPA 2:

Pressione o botão do temporizador para definir o tempo de respiração.

ETAPA 3:

Abra a tampa do tanque de água.

ETAPA 4:

Adicione água destilada ao tanque de água da máquina.

ETAPA 5:

Para inalação com cateter, use a cânula Y, um na saída dos gases H₂ e outro na saída O₂.

ETAPA 6:

Para o uso do óculos, fone ou difusor para hidrogenar o seu recipiente de água, utilize apenas a saída de H₂.

CÓDIGO DE ERRO	FENÔMENOS ANORMAIS	VERIFICAÇÃO E SOLUÇÕES
E1	Valor de TDS da água incorreto, não pode ser usado p/produzir gás H ₂	Solução: é preciso trocar a água normal por água purificada
E2	Temperatura da água muito alta	Solução: Aguarde a temperatura da água abaixar ou troque a água por uma nova
E3	Escassez de água ou excesso de água na linha máxima	Verifique o nível da água. 1º Se a água estiver abaixo da linha mínima, é necessário adicionar água. 2º Se a água exceder a linha máxima, tire um pouco de água, coloque abaixo da linha máxima
E4	A tensão da célula excede com variação de energia.	Use um estabilizador de energia ou entre em contato com o fabricante
E5	A água excede a linha máxima de água	Solução: É necessário despejar um pouco de água, deixe abaixo da linha máxima

INSTRUÇÕES DE USO

Quando o aparelho não estiver em uso, desconecte o plugue de alimentação.

INSTRUÇÕES DE ENCHIMENTO DE ÁGUA

Primeiro conecte o aparelho a energia. A luz indicadora de baixo nível de água da máquina estará vermelha. Abra a tampa do reservatório e adicione água destilada. Ao adicionar água, alinhe com o nível máximo, até a luz ficar azul, não ultrapasse o nível máximo de água para prevenir danos à máquina. A água utilizada deve ser destilada. Se outros tipos de água forem usados, a luz verde se acenderá podendo causar danos à máquina e o usuário perderá a garantia fornecida pela empresa.

SUBSTITUIÇÃO DE ÁGUA

Recomenda-se substituir a água uma vez por semana, independentemente da frequência de uso.

RESFRIAMENTO ADEQUADO

Não opere aparelho continuamente por mais de 8 horas. Após 8 horas de operação, desligue o aparelho da energia e o deixe esfriar. Reinicie após 1 hora. A operação prolongada deve ser evitada para prevenir danos. O aparelho de hidrogênio e oxigênio deve ser colocado em uma área bem ventilada, evite a luz solar direta. Quando estiver em operação em ambientes fechados, escolha um local adequado, onde a temperatura ambiente não deve ser inferior a 10°C nem superior a 30°C. Temperaturas muito baixas ou muito altas podem prejudicar o funcionamento do aparelho.

Evite deixar o equipamento no sol ou em lugares muito quentes (exemplo: no carro fechado)

DURANTE O USO

Durante o processo de uso, é aconselhável operar o produto por um minuto antes de colocá-lo nas narinas. Se ocorrer algum desconforto ou efeitos adversos durante o uso, é importante interromper imediatamente o uso do produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Fique longe do fogo, é expressamente proibido fumar durante o uso, o uso de chamas abertas é estritamente proibido para evitar perigo de explosão.

SEM INVERSÃO OU POSICIONAMENTO HORIZONTAL

Não transporte a máquina de ponta cabeça e nem posicionada horizontalmente. Quando não estiver em uso, drene e substitua a água em tempo hábil. Se precisar transportar a máquina, drene toda a água armazenada no tanque de água para evitar danos à máquina.

NÃO COLOQUE OBJETOS SOBRE A MÁQUINA

Especialmente líquidos, nenhum resíduo deve ser colocado ao redor da máquina para evitar que a porta de exaustão seja bloqueada, o que pode causar um aumento da temperatura e a máquina parar de trabalhar ou a concentração de oxigênio e hidrogênio diminuir. Nenhuma graxa ou substância gordurosa deve ser usada em qualquer parte da máquina para evitar contaminar a porta de escape e causar perigo. Durante a operação, certifique-se de que todas as portas de exaustão estejam desobstruídas e que as mangueiras estejam alinhadas.

REPARO E DESMONTAGEM PROIBIDOS

Pessoas não qualificadas não devem reparar ou desmontar a máquina, caso contrário podem ocorrer acidentes como incêndio, choque elétrico e perda da garantia.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

Todos os equipamentos são testados antes do envio para garantir o bom funcionamento. O produto conta com um ano de garantia para defeitos de fabricação, excluindo danos causados por uso inadequado e falta de cuidado.

NOTA FISCAL

Todos os produtos são acompanhados de nota fiscal, assegurando autenticidade e qualidade. Agradecemos por escolher a nossa empresa! Esperamos que o MEU GERADOR DE HIDROGÊNIO proporcione uma experiência positiva e transformadora para você e toda a sua família.

COMPROMISSO COM VOCÊ

Nosso compromisso é trazer para você e sua família uma solução para melhorar a sua saúde de uma forma tecnológica, eficaz e inovadora através do MEU HIDROGÊNIO. A melhora da sua saúde e da sua família é o nosso bem mais precioso, por isso trabalhamos incansavelmente para que isso aconteça.



"A TECNOLOGIA PROLONGANDO A NOSSA VIDA"

INFORMAÇÕES

 (18) 99685-4217

 @meuhidrogenio

 meuhidrogenio.com.br

CNPJ 58.976.175/0001-19
MEU HIDROGÊNIO LTDA
R. Altino Arantes, 108 - Dona Amelia
Araçatuba - SP, 16050-640